

Beschrijving van de test

Translocatie acute leukemie bij follow-up (zeldzamere translocaties)

Beschrijving van de test

Naam:	Translocatie acute leukemie bij follow-up (zeldzamere translocaties)
Intern codenummer:	5600
Frequentie:	1x per week
Antwoordtijd (TAT):	2 weken
Verantwoordelijk bioloog:	Barbara Depreter

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	monster voor PCR-onderzoek (cDNA)
Toegelaten materiaal:	Afname van beenmerg of bloed in EDTA-buis, voorkeurmateriaal is beenmerg
Volume:	BM 1 mL, bloed 3 mL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Vers afgenomen met vermelding afnametijdstip op aanvraagformulier (datum en uur). Belang pre-analytische fase - stabiliteit staal: De stabiliteit van een staal met vermoeden acute leukemie voor moleculaire uitwerking is beperkt door de bepaling op RNA gebeurt. Het staal daarom zo snel mogelijk aan het labo bezorgen.
Conditionering & verzending:	De verwerking van het monster (isolatie witte bloedcellen) zeker binnen de 48h na afname uitgevoerd worden! Een onverwerkt staal moet daarom binnen de 24h na afname het uitvoerend labo bereiken! In tussentijd moet het staal in de koelkast bewaard worden (2-8°C).
Bijaanvraag/stabiliteit:	48

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Hematologie
Bijkomende informatie:	Voor bepaalde translocaties bestaan er vaste verzendcodes. Echter, indien er geen specifieke verzendcode bestaat en er in UZG toch een kwalitatieve of kwantitatieve opvolg PCR-tets voor bestaat, wordt deze code gebruikt.

Laatst gewijzigd op

25-02-2026

Barbara Depreter

Copyright © 2026 All rights reserved.