

isavuconazole

Beschrijving van de test

Naam:	isavuconazole
Intern codenummer:	9536
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	AZ St.-Jan Labo Biochemie
Antwoordtijd (TAT):	5 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 buis
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Bloedafname onmiddellijk voor volgende toediening (dalspiegel). De 1ste dalspiegel wordt best afgenomen na 7 dagen therapie (steady-state conc.). Toegediende dosis, doseerfrequentie en toedieningsweg vermelden op het aanvraagformulier en identificatielabel.
Conditionering & verzending:	Satellietlabo's: na het laatste transport het staal centrifugeren, aliquoteren en in frigo bewaren tot een volgend transport de volgende dag. Verzending op KT. Serum in koelkast bewaren in afwachting van verzending.
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ St.-Jan Brugge
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	µg/mL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

4.0-6.0 µg/mL

4.0-6.0 µg/mL

Tarificatie

Nomenclatuur:

547153 - 547164 B 1600 Dosereren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel [49](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

24-02-2026

Tessa Baert