

### Vrije vetzuren (C16-C18)

#### Beschrijving van de test

Naam:	Vrije vetzuren (C16-C18)
Synoniemen:	NEFA non esterified fatty acid
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	Patientvoorbereiding: nuchter gedurende 12u
Conditionering & verzending:	Labo: de serumhuis dadelijk gekoeld centrifugeren en serum invriezen. Zoniet, dan breekt het serum lipase de triglyceriden af tot vetzuren, wat leidt tot vals verhoogde waarden. Serum ingevroren verzenden
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

#### Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	$\mu\text{mol/L}$
Bijkomende informatie:	In vivo toediening van heparine geeft vals verhoogde waarden

#### Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	100.00-600.00 $\mu\text{mol/L}$	100.00-450.00 $\mu\text{mol/L}$

## Tarificatie

Nomenclatuur: 542511 - 542522 B 250 Doseran van vrije vetzuren #(Maximum 1)(Diagnosereg<sup>el</sup> [40](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

12-01-2026

Kelly Derore

Copyright © 2026 All rights reserved.