

Beschrijving van de test

Neurofilamenten in cerebrospinaal vocht (pNfH + NfL)

Beschrijving van de test

Naam:	Neurofilamenten in cerebrospinaal vocht (pNfH + NfL)
Synoniemen:	ALS biomerkers; NfL; biomerkers voor amyotrofe laterale sclerose; gefosforyleerd neurofilament zware ketens; neurobiomarker; neurofilament lichte ketens; pNfH
Intern codenummer:	9658 (pNfH + NfL)
Frequentie:	2 x per maand
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	Variabel

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	CSF aliquot
Volume:	2 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Staal onmiddelijk naar labo brengen
Conditionering & verzending:	2 ml staal dadelijk gekoeld centrifugeren gedurende 10 minuten op 2000g en invriezen: - 2 x 750 µL supernatans aliquoteren in 2 polypropyleen eppendorffjes. - Overschot supernatans in polypropyleentube. - Alles invriezen op - 20 °C - Verzenden op droog ijs en zorgen dat de stalen in UZ Leuven aankomen op werkdagen tussen 8 en 17 uur.
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Scheikunde

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst:

<https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9>

Laatst gewijzigd op

06-02-2026

Saartje Gijbels

Copyright © 2026 All rights reserved.