

Galactose-1P-uridyltransferase (Gal1PUT)

Beschrijving van de test

Naam:	Galactose-1P-uridyltransferase (Gal1PUT)
Intern codenummer:	9295
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	bloedspot
Toegelaten materiaal:	1 EDTA-tube of 3 bloedspots
Volume:	1 tube; 3 spots
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	De blood spots worden verkregen via vingerprik of van een nieuw geprikte EDTA-tube. - Vul minstens 3 cirkels van een bloedspotkaart VOLLEDIG met bloed zodat het bloed zichtbaar is aan beide zijden van het kaartje. - Laat de bloedspots drogen aan de lucht gedurende minstens 4u (ideaal overnacht) bij KT, niet verwarmen of rechtstreeks blootstellen aan zonlicht
Conditionering & verzending:	Verzending op KT Bewaring tot verzending: EDTA-buis in frigo, DBS op KT
Bijaanvraag/stabiliteit:	Niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Scheikunde

Tarificatie

Nomenclatuur: 541973 - 541984 B 500 Dosereren van een intra-erythrocytair of
intra-leucocytair enzym #(Maximum 5)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

16-01-2026

Tessa Baert

Copyright © 2026 All rights reserved.