

Vaderschapsonderzoek

Beschrijving van de test

Naam:	Vaderschapsonderzoek
Synoniemen:	Vaderschapstest, paternity curiosity test, paterniteit
Intern codenummer:	9835
Uitvoerend labo:	Laboratory of Pharmaceutical Biotechnology
Antwoordtijd (TAT):	1 maand

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	wisser
Toegelaten materiaal:	2 wissers per te testen persoon: 2x vader + 2x kind
Volume:	4 wissers
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Instructies afname wangwisser: STEEDS 2 WISSERS AFNEMEN PER PERSOON (dus 4 wissers per aanvraag).

De persoon zelf opent de wissers en wrijft ermee tegen de binnenkant van de wang, 1 wisser voor de linkerwang (staal 1) en 1 wisser voor de rechterwang (staal 2). De wissers tekenen met naam en afnamedatum.

Voor kinderen de wissers afnemen met handschoenen om contaminatie met vreemd DNA te vermijden.

De afname kan thuis gebeuren als de stalen dan zo snel mogelijk na afname binnengebracht worden in het labo. Optimaal is dat de stalen ingevroren worden na afname, maar als men ze onmiddellijk kan binnenbrengen, gebeurt dat in het labo.

Conditionering & verzending:	Instructies registratie: de aanvraag wordt geregistreerd op naam van de aanvragende ouder, niet op naam van het kind met als aanvragende arts de klinisch bioloog chemie van routine.
------------------------------	---

Stalen worden opgehaald door koerierdienst Eurofins (Brugse firma) binnen 2 werkdagen na telefonische vraag tot ophaling

(050 31 02 52) en door hen naar het uitvoerend labo in Gent gebracht.

Centraal labo: wissers invriezen.

4 WISSERS PER AANVRAAG

Bijaanvraag/stabiliteit: 7 dagen

Analyse

Analysemethode: LAB Pharmaceutical Biotechnology
Domein: Scheikunde
Bijkomende informatie: Deze test is niet rechtsgeldig en kan dus niet in rechtsprocedures gebruikt worden.
Voor een rechtsgeldige vaderschapstest (geldig voor rechtbank) kan contact opgenomen worden met:
Prof. Dr. Apr. Dieter Deforce
Eurofins Forensics Belgium
P/A Laboratorium voor Farmaceutische Biotechnologie
Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 264 80 67
GSM: +32 (0)498 818 606
E-mail: Dieter.Deforce@UGent.be

Deze test mag wettelijk niet uitgevoerd worden bij Franse staatsburgers.

Een aanvraag én toestemmingsformulier moeten ingevuld en ondertekend worden door de ouder.
Bij een minderjarig kind (18 jaar), moet een van de wettelijke ouders (of de voogd) toestemmen.

Wissers opvragen in de ambulante bloedafname Campus Rumbeke.

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9>

Laatst gewijzigd op

28-04-2026

Lutgart Gheysens

Copyright © 2026 All rights reserved.