

Cytose BAL-vocht

Beschrijving van de test

| | |
|---------------------------|---|
| Naam: | Cytose BAL-vocht |
| Intern codenummer: | 526 |
| Frequentie: | Dagelijks |
| Uitvoerend labo: | Campus Menen,Campus Rumbeke,Campus Tielt,Campus Torhout |
| Antwoordtijd (TAT): | max. 24u, indien dringend 1u |
| Verantwoordelijk bioloog: | Hilde Vandenbussche |

Afname van het materiaal

| | |
|--------------------------|---|
| Voorkeur materiaal: | broncho alveolaire lavage (BAL-vocht) |
| Volume: | min. 1 ml |
| Aanvraagformulier: | Aanvraagformulieren |
| Afnameinstructies: | Afname instructies |
| Aandachtspunten: | Het BAL-vocht wordt in een pot met volumegradatie gebracht. Graag volume IN en UIT op de pot vermelden. |
| Bijaanvraag/stabiliteit: | 4u bij 2°C - 8°C |

Analyse

| | |
|-----------------|-------------|
| Analysemethode: | Sysmex |
| Domein: | Hematologie |
| Eenheid: | x10E4/mL |

Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|----------|-------------------|-------------------|
| | 3.0-35.0 x10E4/mL | 3.0-35.0 x10E4/mL |

Tarificatie

Nomenclatuur: 550771 - 550782 B 1000 Cytologisch onderzoek van
punctievloeistoffen met tellen van de leucocyten en
leucocytenformule #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

21-05-2026

Jonathan Vanbesien

Copyright © 2026 All rights reserved.