

Beschrijving van de test

POCT: AmniSure test

Beschrijving van de test

Naam:	POCT: AmniSure test
Synoniemen:	ROM: rupture of fetal membranes
Intern codenummer:	L13
Frequentie:	bedside test
Uitvoerend labo:	POCT AZDELTA+SAT
Antwoordtijd (TAT):	binnen 5 minuten na start test
Verantwoordelijk bioloog:	Johan Debrabandere

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	wisser
Toegelaten materiaal:	vaginaal secreet Amnisure test kit
Volume:	1 swab uit testkit
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	AZ Delta: Uitvoerder maakt elektronisch order in HiX aan én vul het resultaat ook in. Andere Zie aanvraagformulieren
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	POCT MANUEEL
Domein:	Scheikunde
Bijkomende informatie:	De AmniSure ROM test is een visueel interpreteerbare kwalitatieve immunochromatische dipstick test voor het aantonen van vruchtwater in vaginale afscheiding tijdens zwangerschap. Placenta alfa-microglobuline-1 (PAMG-1) is aanwezig in de

bloed-, vruchtwater- en cervico-vaginale secreties van zwangere vrouwen.

De concentratie is echter een 1000-tal keer hoger bij ROM (rupture of membranes) dan in vaginaal secreet van zwangere vrouwen wanneer het foetale membraan intact is.

PAMG-1 is aanwezig in het vruchtwater gedurende alle trimesters van de zwangerschap.

De AmniSure ROM-test detecteert het PAMG-1 in sporenhoeveelheden, dus van zodra vruchtwater lekt in de vagina.

Met intacte foetale membranen detecteert de test normaal gesproken PAMG-1 niet vanwege de te lage achtergrondconcentratie.

Laatst gewijzigd op

22-12-2025

Adelheid Commeyne