

lysosomale zure lipase (kwantitatief); Ziekte van Wolman

Beschrijving van de test

Naam:	lysosomale zure lipase (kwantitatief); Ziekte van Wolman
Intern codenummer:	9326
Frequentie:	1x per 2 weken
Uitvoerend labo:	Labo VUB Pediatrie
Antwoordtijd (TAT):	1 maand

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	capillair bloed
Volume:	3 spots
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	<p>De blood spots worden verkregen via vingerprik. Reinig de prikplaats met ontsmettingsalcohol, laat de ontsmettingsalcohol verdampen op de huid voor staalname. Zorg ervoor dat er geen alcohol op het kaartje terecht komt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Vul minstens 3 cirkels van een bloedspotkaart VOLLEDIG met bloed zodat het bloed zichtbaar is aan beide zijden van het kaartje.- Laat de bloedspots drogen aan de lucht gedurende minstens 4u (ideaal nacht) bij KT, niet verwarmen of rechtstreeks blootstellen aan zonlicht.
Conditionering & verzending:	Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht. Onmiddellijk verzenden op kamertemperatuur of bij -20°C in plastic zakje met droogmiddel.
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ VUB
-----------------	------------

Domein:	Scheikunde
Eenheid:	nmol/p/u

Tarificatie

Nomenclatuur: 542474 - 542485 B 500 Dosereren van een lysosomaal enzym (Maximaal 1)(Diagnosereg^{el} [40](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

02-04-2026

Freya Van de Steen