

Beschrijving van de test

Isoelektrofocussing van lumbaal vocht (LV_FOC)

Beschrijving van de test

Naam:	Isoelektrofocussing van lumbaal vocht (LV_FOC)
Synoniemen:	Elektrofocusing
Intern codenummer:	536
Frequentie:	1x per week op woensdag
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	1 week
Verantwoordelijk bioloog:	Dieter De Smet

Afname van het materiaal

Volume:	Zie aandachtspunt
Aandachtspunten:	500 µl LV en 1 serumbuis
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Algemeen berekenstation
Domein:	Scheikunde
Bijkomende informatie:	Om de intrathecale IgG synthese te bevestigen, dient serum en CSF van de patiënt (op hetzelfde ogenblik afgenomen) parallel geanalyseerd te worden om de verschillen in de IgG distributie aan te tonen. De test wordt in 2 fasen uitgevoerd: 1. isoelectric focusing op agarose gel (scheiden van eiwitten in CSF en serum) 2. immunofixatie met enzym gelabeld anti-IgG (opsporen oligoclonale IgG banden, aantonen verschil CSF en serum)

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.30-0.70

0.30-0.70

Laatst gewijzigd op

25-02-2026

Johan Debrabandere

Copyright © 2026 All rights reserved.