

Beschrijving van de test

Aërobe kweek urine

Beschrijving van de test

Naam:	Aërobe kweek urine
Synoniemen:	urineweginfectie, UTI
Intern codenummer:	2A
Loinc:	634-6
Frequentie:	dagelijks
Antwoordtijd (TAT):	2 tot 7 dagen
Accreditatie:	AZ Delta is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 382-MED.
Verantwoordelijk bioloog:	Emmanuel De Laere

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Urine in urinebuis voor microbiologische analyse
Toegelaten materiaal:	Suprapubis punctie, first voided, nefrostomie, éénmalige sondage, verblijfssonde, zakje neonatale, clean catch.
Commentaar:	Voor kweek moet een midstream urine afgenomen worden, d.w.z. dat tijdens het urineren, het eerste deel van de urine niet opgevangen wordt (spoeleffect), maar enkel het middelste deel.
Volume:	4 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Kweekmethode
Domein:	Algemene en Moleculaire Microbiologie
Bijkomende informatie:	De klinische relevantie van het kweekresultaat moet beoordeeld worden aan de hand van het aantal bacteriën en het type bacterie, de aan -of afwezigheid van pyurie in het monster, de al dan niet aanwezigheid van symptomen en het onderliggend

lijden bij de patiënt.

≥ 3 uropathogenen wijst op een slechte afnametechniek. De microbioloog beslist over verdere afwerking van deze monsters.

Laatst gewijzigd op

30-06-2025

Emmanuel De Laere

Copyright © 2026 All rights reserved.