

HIV PCR

Beschrijving van de test

Naam:	HIV PCR
Intern codenummer:	7730
Uitvoerend labo:	ARL UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	5 dagen na ontvangst uitvoerende labo

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed grote tube
Volume:	9ml (2 grote tubes)
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Labo: Bewaar en transporteer de EDTA-buis op KT Het volbloed staal moet binnen de 24h na afname op het ARL toekomen, af te leveren op werkdagen (ma-vr) vóór 16u30. In geval bovenstaand niet mogelijk is, zie onderstaande instructies voor het verwerken van bloed in eigen laboratorium: *Isolatie van plasma: Deze procedure moet uitgevoerd worden 6u na bloedafname en met gebruik van steriel materiaal. - Centrifugeer het EDTA-bloed 10 min. bij 1900g (cfr centrifugeren van serum) bij KT. - Verdeel het plasma (3-5ml) over twee tubes (screwcap tubes, 2.0 ml of 1.7 ml) - Vries de tubes zo snel mogelijk in bij -20°C. - Transporteer de tubes diepgevroren (droog ijs) naar het ARL.
Bijaanvraag/stabiliteit:	8

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Bijkomende informatie:	De concentratie HIV in plasma is een belangrijke merker voor het volgen van het effect van antivirale medicatie en een maat voor de evolutie van het ziekteproces bij de met HIV-geïnfecteerde patiënt. De test is enkel geschikt voor de bepaling van HIV-1 geïnfecteerde patiënten. HIV-diagnose bij kinderen 18mnd: zie website ARL: 'Diagnostische DNA PCR'

Laatst gewijzigd op

08-01-2026

Tessa Baert