

Bloedplaatjesfunctieanalyse (PFA)

Beschrijving van de test

Naam:	Bloedplaatjesfunctieanalyse (PFA)
Synoniemen:	bloedplaatjesfunctie, plaatjesfunctie, plaatjesaggregatie, trombocytenfunctie, trombocytenaggregatie, stolling, bloeding, hemostase
Intern codenummer:	498
Frequentie:	Op aanvraag
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	Binnen 4u na afname
Verantwoordelijk bioloog:	Inge Van haute

Afname van het materiaal

Toegelaten materiaal:	Citraatplasma
Volume:	2 citraat-tubes
Aandachtspunten:	Staal onmiddellijk na afname aan het labo bezorgen, transport bij voorkeur niet via buizenpost.
Conditionering & verzending:	Staal binnen 4h na afname analyseren Minimum 80 000 PLT/ μ L en minstens 30% hematocriet anders niet uitvoerbaar!
	labo: - CITRAATBLOED NIET CENTRIFUGEREN!!!
Bijaanvraag/stabiliteit:	4u

Analyse

Analysemethode:	Algemeen berekenstation
Domein:	Stolling
Bijkomende informatie:	De PFA test wordt gebruikt om aangeboren, verworven, of drug-geïnduceerde vormen van bloedplaatjesdysfunctie te detecteren.

In combinatie met de traditionele stollingstesten zoals de protrombinetijd en de geactiveerde partiële tromboplastinetijd, verstrekt de Innovance PFA-200 een uitstekende gevoeligheid voor enkele functionele gebreken van hemostase, zoals bij Von Willebrand ziekte. Het detecteert bovendien aspirine-geïnduceerde bloedplaatjesdysfunctie. Een normale sluitingstijd op het PFA-200 toestel kan echter een milde vWD en/ of milde plaatjesdysfunctie niet uitsluiten.

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2!9>

Laatst gewijzigd op

06-02-2026

Saartje Gijbels