

Beschrijving van de test

Monkeypox (apenpokken) op SWAB

Beschrijving van de test

Naam:	Monkeypox (apenpokken) op SWAB
Synoniemen:	orthopoxvirus
Intern codenummer:	9853
Frequentie:	op aanvraag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	2 tot 7 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	wisser
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	De analyse gebeurt op een wisser van een huidletsel. Bij afwezigheid van letsels of niet-sluitende resultaten obv huidwisser wordt bijkomend ook geanalyseerd op keelwisser, rectale wisser (enkel bij rectale of anale letsels), EDTA bloedstaal.
Conditionering & verzending:	Stalen dienen gekoeld of ingevroren te worden binnen het uur na collectie! Satellietlabs: Het staal gekoeld bewaren tot transport naar labo Rumbeke. Labo Rumbeke: de stalen invriezen en diepgevroren versturen. Indien aanwezig: nasof_wisser, Swab en EDTA samen verzenden. De verzendverpakking is gelabeld met UN2814. De koerier voor transport van deze stalen moet beschikken over een ADR-licentie voor klasse 3 pathogenen (IHCT ok) Aanvraagformulier: https://labo.itg.be/wp-content/uploads/2022/09/20220825_Aanvraagformulier-labo-MPX_NL.pdf
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Verzendingen Microbiologie

Laatst gewijzigd op

19-02-2026

Evelien Debaeke

Copyright © 2026 All rights reserved.