

Beschrijving van de test

KMT2A::MLLT3 fusietranscript (kwantitatieve MRD analyse bij AML)

Beschrijving van de test

Naam:	KMT2A::MLLT3 fusietranscript (kwantitatieve MRD analyse bij AML)
Synoniemen:	FU AML t(9;11)
Frequentie:	1 x per 2 weken
Antwoordtijd (TAT):	20 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	monster voor PCR-onderzoek (cDNA)
Volume:	1 buis
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Niet afnemen op vrijdagnammiddag. Stalen moeten binnen de 24h na afname bereiken het doorstuurlabo.
Conditionering & verzending:	De stabiliteit van het staal is beperkt (bepaling op RNA) zodat de verwerking van het monster (isolatie witte bloedcellen) zeker binnen de 48h na afname moet uitgevoerd worden! Daarom moet het staal zo snel mogelijk naar het labo CMD verstuurd worden, namelijk binnen de 24h na afname! Bewaring van het staal tot begin verwerking van de stalen of voor verzending naar het labo in koelkast bij 2-8°C.
Bijaanvraag/stabiliteit:	24u

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Hematologie
Eenheid:	%

Laatst gewijzigd op

03-02-2026

Emmanuel De Laere

