

POCT: Hgb poct

Beschrijving van de test

Naam:	POCT: Hgb poct
Intern codenummer:	Hb_TC 112b
Frequentie:	bedside test
Uitvoerend labo:	POCT AZDELTA+SAT
Antwoordtijd (TAT):	onmiddellijk
Verantwoordelijk bioloog:	Johan Debrabandere

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	capillair bloed
Toegelaten materiaal:	vingerprik volbloed
Volume:	vingerprik druppel
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	POC-toestel: HemoCue De cuvette dient voldoende gevuld te worden binnen de 3 minuten na het uithalen uit het doosje, en de meting moet binnen de 10 minuten na het vullen van de cuvette gestart worden Aanvraag en resultaat worden automatisch gestuurd naar HiX
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	Rapid 500 MatR
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	g/dL
Bijkomende informatie:	Ingeval klinisch vermoeden van anemie dient steeds een veneuze afname voor hb meting te gebeuren. Waarden tot 7 g/dl dienen tevens geconfirmeerd te worden met een veneuze meting.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	13.3-16.7 g/dL	11.8-14.8 g/dL

Tarificatie

Nomenclatuur:

127013 - 127024 B 40 Doseran van hemoglobine door
elektrofotometrische methode #(Maximum 1)

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

05-02-2026

Adelheid Commeyne